



INSTRUCCIÓN MONTAJE PANTALLA FACIAL

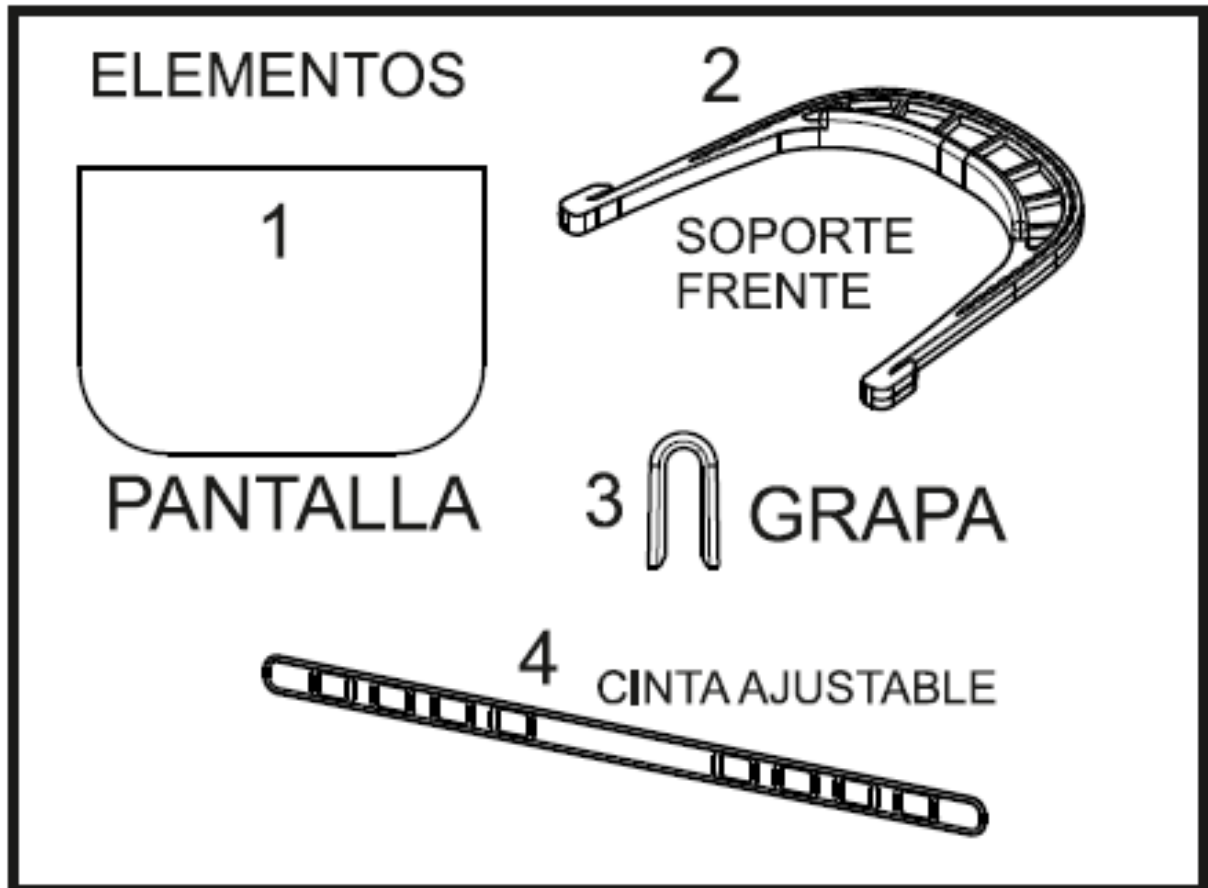


1 - FLEXIONAR LA PANTALLA E INTRODUCIR EN EL SOPORTE DE LA FRENTE

2 - AJUSTAR LA ALTURA Y PONER LA GRAPA

3 - COLOCAR LA CINTA AJUSTABLE SEGÚN MEDIDA

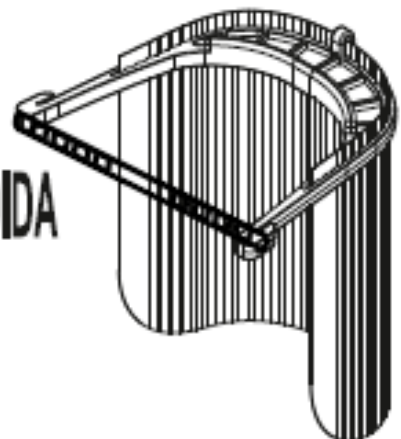

	Expediente Técnico	
	MCI FACE PROTECTION	<i>Abril 2020</i>
		<i>Edición 1</i>

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para realizar el mantenimiento de los diferentes componentes del MCI FACE PROTECTOR, se recomienda emplear los siguientes métodos:



- Grapas, Pantalla protectora: realizar mantenimiento lavando con agua y jabón.
- Cinta de ajuste y soporte: esterilizar

Tener en cuenta:

- Pantalla protectora intercambiable
- Si se esteriliza los componentes de silicona (cinta de ajuste y soporte), su vida útil es de 3 meses aproximadamente
- Para el resto de componentes, la vida útil estimada es de 1 año

Este equipo de protección individual está destinado a proteger a las personas ante posibles lesiones superficiales mecánicas, condiciones ambientales no extremas y riesgos de salpicaduras.

Aquellos equipos cuyas pantallas se encuentren rayadas o estropeadas deberán ser retirados o sustituidos.

	MOLDEADOS DE CAUCHO ÍSCAR	
	Calle Molino nº 44 - 46 47420, Íscar (Valladolid)	
	Marca: MCI	
	Modelo: MCI FACE PROTECTION	
	SN: XXXXXXXXXX	Año de fabricación: 2020